

Держатель для антисептика настенный локтевой «ДЛТ-1»

Изготавливаются из металла
с полимерным покрытием.

Поставляются в разобранном виде.


Габаритные размеры, не более:
Д=90мм, Ш=300мм, В=280мм.
Вес не более 0,5 кг.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус - 1 шт

Рычаг - 1 шт

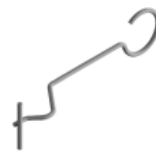

Крепеж:
Винт саморез 4x40 - 3 шт
Дюбель 6x35 - 3 шт

Флакон, входящий в комплект, может отличаться от представленного на картинке.

СБОРКА

Рис. 1 - Опустить Рычаг вниз

Рис. 2 - Завести один край в отверстие до упора

Рис. 3 - Обратным движением завести второй край в отверстие

Рис. 4 - Поднять рычаг в паз корпуса.

Рис. 5 - Установка флакона: отвернуть дозатор с флакона, флакон подвести снизу в отверстие

Рис. 6 - Сверху накрутить дозатор

Рис. 1



Рис. 2

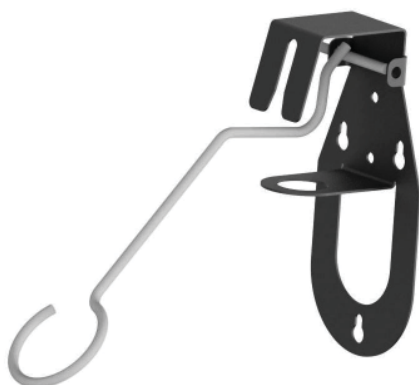


Рис. 3

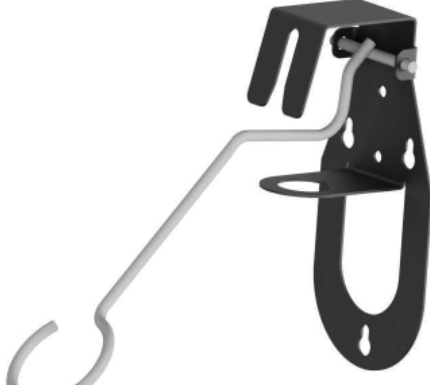


Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

